

# Audinor TRIO system 3.0 Quick Guide



**Mikrofon T20**  
til samtalepartner



**Modtager R20**  
til dig



**TV-streamer T50**  
tilkobles fjernsynet

## Opladning

Sæt ladeledningen i ladekontakten på mikrofon og modtager ved hjælp af det magnetiske stik. Enhedens lampe lyser rødt når den lades op, og grønt når den er fuldt opladet. NB: TV-streamer skal ikke oplades.

## Tænd/sluk

- Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 1 sekund, indtil den grønne lampen slukker.
- Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 1 sekund, indtil den røde lampen slukker.

## Samtale

Placer mikrofonen på bordet eller rundt om halsen på samtalepartner.

Når du bruger halsslyngen, skal høreapparaterne skiftes til teleslynge programmet. Hvis du ikke har høreapparater, kan man alternativt bruge et par almindelige hovedtelefoner.

## Lydstyrke på modtager

Tryk kort på knappen med + symbol for at skrue op for lyden.

Tryk kort på knappen med – symbol for at skrue ned for lyden.

## **TV + samtale**

Med TV-streameren installeret ved dit fjernsyn, skal du ganske enkelt tage modtageren på når du skal se fjernsyn. Husk at skifte høreapparaterne til teleslynge program.

Hvis du ønsker at høre en samtalepartner samtidigt med at du ser fjernsyn, skal vedkommende bære mikrofonen rundt om halsen. Lyden fra TV'et bliver automatisk dæmpet, og stemmen til din samtalepartner bliver fremhævet, så stemmen kan høres klart og tydeligt.

## **Samtale i støj:**

- **Interview mode (mikrofon):** Hold mikrofonen i hånden så den peger skråt op i retning af vedkommende du ønsker at høre.
- **Zoom mode (mikrofon):** Tryk på zoom knappen på mikrofonen og læg mikrofonen på bordet – pegende i retning af samtalepartner. Lampen blinker hvidt når funktionen er aktiv. Klik på knappen igen for at deaktivere funktionen.

## **Mute/Dæmpning af bordmikrofon**

Vend mikrofonen med forsiden ned mod bordet for midlertidigt at mute den. Når den vendes tilbage, kommer lyden tilbage igen.

## **Tilkoble Smartphone/Tablet/Laptop**

Du kan tilkoble din Audinor mikrofon eller modtager til de fleste lyd-kilder, eksempelvis i forbindelse med digitale møder. Brug den medfølgende audiokabel med magnetisk stik i den ene ende, og jack-stik i den anden til den ønskede lyd-kilde. Der findes adaptere til de fleste modeller, hvis din lyd-kilde ikke har en jack-udgang.

## **Batteristatus**

Med et kort tryk på tænd/sluk knappen vil enhedens batteristatus blive fortalt på dansk i dit høreapparat, f.eks. "Mikrofon 80 procent".

## **Parring**

Enhederne er færdig parret ved levering. For at parre en modtager til en ny mikrofon, trykkes "lydstyrke op"-knappen på modtageren inde i 3 sek.

**Instruktionsvideoer af systemet findes på vores hjemmeside [www.audinor.dk](http://www.audinor.dk) under "vores løsninger" og "DUO system 3.0".**